




КРЕСЛО-КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ
СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦОМ, ДЕТСКАЯ

ORTONICA OLVIA 400



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



-  ortonica.ru
-  service@ortonica.ru
-  8 (800) 707-44-52
-  8 (950) 756-67-25 Whatsapp

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения об изделии и технические данные
2. Комплектность
3. Ресурсы, срок службы и хранения. Гарантии изготовителя
4. Заметки по транспортированию, хранению, эксплуатации и мерам безопасности
5. Данные изготовителя
6. Гарантийный талон
7. Полезные ресурсы и информация

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Кресло-коляска инвалидная управляемая сопровождающим лицом, детская Ortonica Olvia 400 предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с ДЦП в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием при помощи сопровождающего лица.

Основные технические характеристики

Полная габаритная длина кресла-коляски, ±10 мм	950-1215		
Габаритная высота кресла-коляски, ±10 мм	1060-1220		
Габаритная ширина кресла-коляски, ±10 мм	530	570	620
Высота спинки, ±15 мм	450		
Угол наклона спинки, ±1°	93-160°		
Ширина сиденья, ±10 мм	355	380	430
Эффективная глубина сиденья, ±10 мм	390		
Материал рамы	Алюминий		
Ремни безопасности	Есть		
Масса нетто, кг, не более	27		
Максимальная масса пользователя, кг	80		

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кресло-коляска	1
2	Паспорт изделия	1
3	Насос (при наличии пневматических шин)	1
4	Набор инструментов	1

Конструкция

- Съёмный капюшон с прозрачной вставкой
- Подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и обхвату головы
- Ручки для сопровождающего лица, оснащенные рычагами для плавной регулировки угла наклона спинки и сиденья
- Ручки для сопровождающего лица, оснащенные системой торможения
- Спинка, регулируемая по углу наклона
- Спинка и сиденье, совместно регулируемые по углу наклона

Скачивайте электронную инструкцию

Скачивайте полную инструкцию к механической инвалидной коляске.



Скачать инструкцию

Получите подарок за отзыв

Расскажите, что Вам нравится в продукции Ortonica и получите подарок.



Оставить отзыв

Получите поддержку от государства

Получите компенсацию за коляску через Социальный фонд России (СФР).



Получить компенсацию

7. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Мы собрали для Вас всю полезную информацию в одном месте. В разделе Вы найдете QR-коды, обеспечивающие мгновенный доступ к полезным ресурсам, инструкциям и товарам.

Расширьте возможности вашей коляски

Сделайте использование коляски удобным и безопасным благодаря дополнительным принадлежностям.



Комфорт пользователя



Обслуживание колес



Больше автономности

Создайте комфортное пространство для жизни

Обеспечьте комфорт в повседневной жизни с помощью практичных решений.



Санитарные стулья



Товары для ванны



Ходунки



Противопролежневые матрасы



Противопролежневые подушки

- Боковые поддержки, регулируемые по высоте и по ширине
- Х-образный и тазовый ремень безопасности
- Съёмный столик с антиспастической ручкой
- Подлокотники, съёмные, регулируемые по высоте и по ширине
- Боковая грязезащита, регулируемая по высоте
- Съёмный абдуктор, регулируемый по глубине
- Ручные стояночные тормоза
- Передние колеса, регулируемые по вертикали
- Задние колеса, регулируемые по горизонтали
- Подножки, съёмные, откидные, регулируемые по длине и по углу наклона
- Мягкие опоры для голени, регулируемые по высоте и углу наклона
- Откидные опоры для стоп
- Съёмные колесные антипрокидыватели, совмещенные с упором для сопровождающего лица, регулируемые по высоте.

3. РЕСУРСЫ, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при условии соблюдения правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение максимальной массы пользователя, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- перемещение в коляске на спущенных колесах;
- истирание протектора, проколы и прочие внешние механические воздействия на резиновые изделия, покрышки в ходе эксплуатации;
- износ текстиля в ходе эксплуатации, например растяжение материала, порезы, загрязнения и т.п.

4. ЗАМЕТКИ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Транспортирование

Для транспортировки коляска вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и укладывается в короб из гофрированного картона или другую тару, исключая повреждение коляски.

Коляска в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании короб с коляской закрепляется и защищается от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Коляска, упакованная в транспортную тару, при транспортировании должна быть устойчива к воздействию климатических факторов для условий хранения 3 по ГОСТ 15150.

Запрещается опрокидывать на бок, переворачивать и резко бросать упакованную коляску во избежание ее повреждения.

Хранение

Условия хранения коляски, освобожденной от транспортной упаковки, соответствуют условиям 1 ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С (отапливаемое хранилище);
- относительная влажность до 80 % при температуре +25 °С.

Меры безопасности

- При посадке в коляску и высадке из нее колеса должны быть зафиксированы тормозами.
- Во избежание поломки или опрокидывания коляски, запрещается становиться на опоры для ног, если они находятся в горизонтальном положении.
- Запрещается использовать коляску с неисправными тормозами.
- Перед посадкой в коляску убедитесь в том, что давление в шинах правильное.
- Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности покрышек.

Подготовка к эксплуатации

- Эксплуатацию коляски необходимо осуществлять согласно Инструкции по эксплуатации.
- Коляска складывается и раскладывается без инструмента: для приведения коляски в рабочее состояние необходимо нажать на верхние трубы механизма складывания вниз до полного натяжения сиденья.
- Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально.
- Для складывания коляски необходимо поднять опоры для ног в вертикальное положение и потянуть вверх полотно сиденья до полного складывания.

Техническое обслуживание

- Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
- Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.
- Один раз в месяц необходимо произвести:
 - проверку исправности тормозных механизмов;
 - проверку затяжки резьбовых соединений;
 - проверку давления в шинах колес.
- Один раз в 6 месяцев необходимо произвести смазку подшипников.

5. ДАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Модель коляски	Кресло-коляска инвалидная управляемая сопровождающим лицом, детская Ortonica Olvia 400
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«А Энд Ай Индастриз Лтд Шуньдэ Фошань», Китай, A & I Industries Ltd Shunde Foshan, Liandu Industrial Park, Le Liu Town, Shunde District, Foshan City, China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15937
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Веб-сайт	ortonica.ru
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8 (800) 707- 44 - 52	

6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Кресло-коляска инвалидная управляемая сопровождающим лицом, детская Ortonica Olvia 400
Серийный номер	
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.